



## CONSEJOS PARA EL PACIENTE - PERFORACIÓN DEL LÓBULO DE LA OREJA

Le aconsejamos las 6 semanas posteriores al proceso de puesta de perforación del lóbulo de la oreja con las cápsulas de los pendientes esterilizados KOMMO que siga todos los puntos durante y después del periodo de cicatrización y en caso de duda consulte a la farmacia que le ha realizado la puesta.

1. Lávese las manos antes de tocar el pendiente o su oreja.

2. Limpie la parte de delante y de atrás del lóbulo de la oreja con una gasa suave de tejido sin tejer y un antiséptico, como la clorhexidina, en los días posteriores a la puesta de pendiente.

3. Gire 180° cada pendiente 2 o 3 veces al día, hacia la izquierda y derecha.

4. Mantenga la superficie perforada limpia y seca, especialmente después de nadar o hacer ejercicios físicos.

5. No se quite los pendientes o toque sus orejas si no es necesario.

6. No apriete el cierre. La mariposa (cierre) siempre debe estar en la punta del palo con la finalidad de permitir que el aire circule para favorecer la curación. Los palos de nuestros pendientes KOMMO tienen una marca que indica la posición adecuada de la mariposa.

8. Tenga especial cuidado al quitarse la ropa para no que no se enganche el pendiente con el tejido de ésta.

7. Hinchazón menor y/o rojez pueden ocurrir inmediatamente – esto es normal. Estos síntomas suelen desaparecer en las siguientes 24 horas siempre que se sigan las instrucciones de cuidado. Si hubiera dolor, hinchazón o rojez pasadas las 24 horas, consulte con su médico o farmacéutico inmediatamente.